

RESMED

H5i™

HEATED HUMIDIFIER



Welcome Guide


Deutsch

S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den H5i Atemluftbefeuchter entschieden haben. Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die gesamte Einführung und das Informationshandbuch.

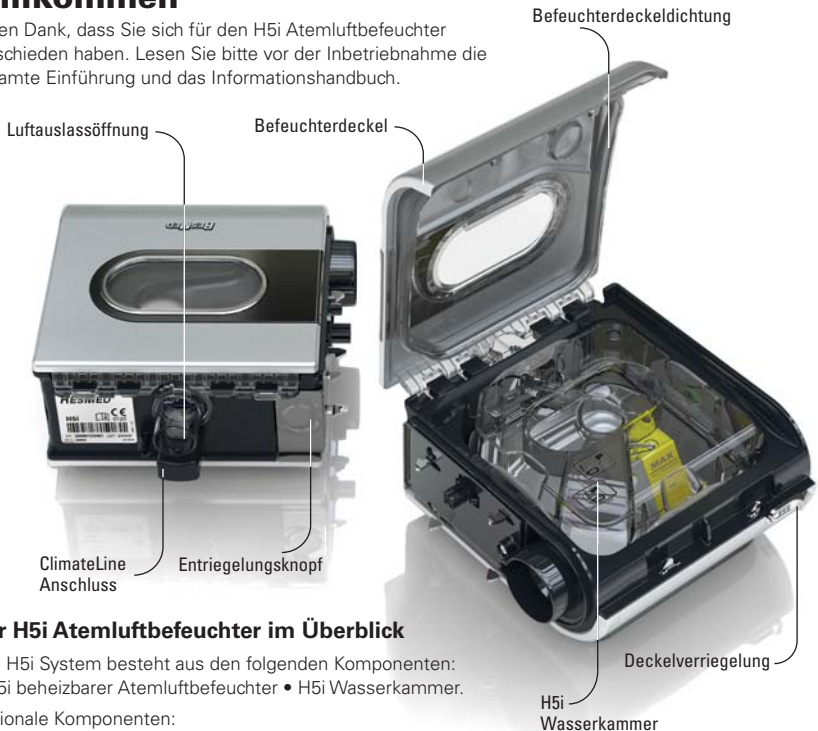

Der H5i Atemluftbefeuchter im Überblick

Das H5i System besteht aus den folgenden Komponenten:

- H5i beheizbarer Atemluftbefeuchter • H5i Wasserkammer.


Optionale Komponenten:

- ClimateLine beheizter Schlauch • H5i Einteilige Wasserkammer.

Tipps für die Reise

Transportieren des oder Reisen mit dem H5i Atemluftbefeuchter:

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserkammer vollständig entleert ist.
- Trennen Sie den H5i Atemluftbefeuchter vom S9 Atemtherapiegerät, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken.

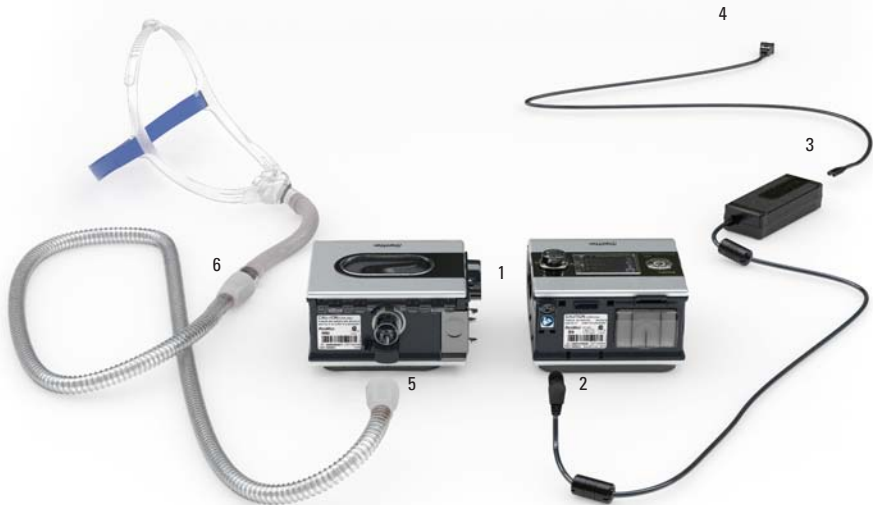

Setup

1. Richten Sie Ihren H5i Atemluftbefeuchter mit Ihrem S9 Atemtherapiegerät aus und drücken Sie die beiden Teile zusammen, bis sie mit einem Klicken einrasten.
2. Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzgerätes hinten an das S9 Atemtherapiegerät an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
4. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.
5. Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches fest an die Luftauslassöffnung an.
6. Verbinden Sie nun das zusammengebaute Maskensystem mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Hinweise:

- Weitere Informationen zum Zusammenbau Ihrer Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Maske.
- Die empfohlenen Masken finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support.

Auffüllen der Wasserkammer

1. Bedienen Sie den Schieber der Deckelverriegelung und öffnen Sie den Befeuchterdeckel.
2. Entnehmen Sie die Wasserkammer.
3. Füllen Sie die Wasserkammer durch das Loch in der Mitte bis zur maximalen Wasserstandsanzeige mit Wasser auf (380 ml).
4. Setzen Sie die Wasserkammer wieder in den H5i Atemluftbefeuchter ein.
5. Schließen Sie den Befeuchterdeckel. Er muss mit einem Klicken einrasten.



Start-/Stopptaste
Startet bzw.
stoppt die
Behandlung.

Startmenü

LCD-Anzeige


Info-Menü
Ermöglicht
Anzeige der
Schlafstatistik.


Setup-Menü
Ermöglicht
Änderungen der
Einstellungen.


BedienController
Durch Drehen des
BedienControllers können
Sie durch das Menü
scrollen und Einstellungen
ändern. Durch Drücken
des BedienControllers
können Sie ein Menü
aufrufen und Ihre Auswahl
bestätigen.


Taste:


Startseite 

Befeuchtungsniveau 


Rampe 


Beheizter
Schlauch 

Klimasteuerung 

Start-/Stopptaste 

BedienController 

Setup-Menü 

Info-Menü 





Grundfunktionen des S9 Atemtherapiegerätes

Die Bedienoberfläche Ihres S9 Atemtherapiegerätes umfasst einen LCD-Bildschirm sowie eine Start-/Stopptaste, einen BedienController und die Info- und Setup-Menütasten.

Einstellen des Befeuchtungsniveaus

Das Befeuchtungsniveau können Sie im Einstellbereich AUS bis 6 individuell wählen, bis Sie eine für Sie angenehme Einstellung gefunden haben. Einstellen des Befeuchtungsniveaus:





1. Drehen Sie  von der STARTSEITE aus, bis der Bildschirm BEF.GRAD in blau erscheint.
2. Drücken Sie auf . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.
3. Drehen Sie , bis das gewünschte Befeuchtungsniveau angezeigt wird.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Aufwärmen Ihres H5i

Die Aufwärmfunktion dient zum Aufwärmen des Wassers vor Behandlungsbeginn. Aufwärmen:

1. Gehen Sie zum Symbol für das Befeuchtungsniveau.
2. Drücken und halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt. Die Aufwärmstatusleiste wird angezeigt.



Sie können das Aufwärmen jederzeit unterbrechen, indem Sie mindestens drei Sekunden lang  drücken. Sie können die Behandlung jederzeit durch Drücken auf  aufnehmen.

Hinweis: Ihr S9 Atemtherapiegerät stellt nach Behandlungsende bis zu einer Stunde lang einen leichten Luftstrom bereit, um das Abkühlen der Heizplatte zu unterstützen. Sie können jedoch den Netzstecker des Gerätes jederzeit aus der Steckdose ziehen und die Heizplatte ohne Luftstrom abkühlen lassen.





Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass das S9 Atemtherapiegerät und der H5i Atemluftbefeuchter korrekt verbunden sind und dass die Wasserkammer höchstens bis zur MAX-Anzeige Wasser aufgefüllt ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf das Befeuchtungsniveau.
3. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske an.
4. Um die Behandlung zu starten, atmen Sie ganz einfach in Ihre Maske und/oder drücken Sie .
5. Legen Sie sich hin und platzieren Sie den Atemschlauch so, dass Sie beim Schlafen nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit gestört werden.
6. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen, indem Sie die Maske abnehmen und/oder  drücken.

Hinweise:

- Wenn Ihr Arzt SmartStart aktiviert hat, startet das Gerät automatisch, sobald Sie in die Maske atmen, und stoppt automatisch, sobald Sie diese abnehmen.
- Nach dem Beginn der Therapie wird der Bildschirm BEF:GRAD angezeigt.

Reinigung und Instandhaltung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Reinigungs- und Wartungsabläufe sollten regelmäßig durchgeführt werden.

Auseinandernehmen des H5i Atemluftbefeuchters

1. Betätigen Sie den Schieber der Deckelverriegelung.
2. Öffnen Sie den Befeuchterdeckel.
3. Entnehmen Sie die Wasserkammer.
4. Entfernen Sie sämtliches Restwasser aus der Wasserkammer.
5. Öffnen Sie alle vier seitlichen Verschlüsse.
6. Nehmen Sie Befeuchterkammerdeckel, Einsatz und Unterteil auseinander.



Tägliche Reinigung

1. Waschen Sie nach dem Auseinandernehmen den Befeuchterkammerdeckel, den Einsatz und das Unterteil in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie die Komponenten gut mit sauberem Wasser ab und lassen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen.

Hinweis: Befeuchterkammerdeckel, Einsatz und Unterteil können im Schon- oder Glaswaschgang in der Spülmaschine gewaschen werden (nur oberste Ablage).

Monatliche Reinigung

1. Ziehen Sie die Befeuchterdeckeldichtung vom Befeuchterdeckel ab und waschen Sie sie in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
2. Reinigen Sie das Gehäuse des H5i Atemluftbefeuchters mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Wiederzusammenbau des H5i Atemluftbefeuchters

1. Platzieren Sie den Einsatz so auf der unteren Hälfte der Befeuchterkammer, dass die MAX-Markierung der Wasserstandsanzeige nach oben weist.
2. Platzieren Sie den oberen Teil der Wasserkammer so auf Einsatz/unterer Hälfte, dass die Einrastpunkte übereinstimmen.
3. Schließen Sie alle vier seitlichen Verschlüsse.
4. Füllen Sie die Wasserkammer auf und legen Sie sie wieder in den H5i Atemluftbefeuchter ein.
5. Schließen Sie den Befeuchterdeckel. Er muss mit einem Klicken einrasten.



Wartungs-Checkliste

- ✓ Untersuchen Sie die Wasserkammer und die Befeuchterdeckeldichtung auf Verschleiß und Abnutzung.
- ✓ Wenn eine Komponente der Wasserkammer durchlässig, rissig, milchig oder narbig geworden ist, wechseln Sie sie aus.
- ✓ Wechseln Sie die Deckeldichtung aus, wenn sie rissig ist.
- ✓ Weißes Pulver oder andere Ablagerungen in der Wasserkammer können mit einer Lösung aus einem Teil Essig und zehn Teilen Wasser entfernt werden.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368129-Ger/2 09 10

H5i

WELCOME

EUR1

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. Protected by AU 2002233025, CN ZL02804936.5, HK 1065483, NZ 527088, US 6935337. Other patents pending. Designs pending. © 2009 ResMed Ltd. 368129-Ger/2 09 10

CE
0120